



 **PartoSsure**[™]

Fácil, Rápido e Confiável

Novo teste para prever o risco de parto prematuro

Reforce sua decisão com PartoSure

Seu apoio na avaliação de risco de parto prematuro espontâneo

A avaliação clínica isolada, incluindo a medida do comprimento e dilatação cervical, não é suficientemente preditiva para um parto iminente entre pacientes que apresentam sinais de trabalho de parto prematuro.

Da mesma forma, os testes biomarcadores atualmente disponíveis, como o que é baseado na detecção de fibronectina fetal (fFN), têm valores preditivos positivos extremamente baixos para o parto iminente.

28%

das pacientes que apresentam sinais e sintomas de trabalho de parto prematuro podem ficar internadas*

O PartoSure é um teste rápido, não invasivo, para a detecção de alfa-microglobulina-1 placentária (PAMG-1) em pacientes com sinais e sintomas de trabalho de parto prematuro.

Os diferenciais do PartoSure incluem:

- Valor preditivo positivo alto (PPV – *Positive Predictive Value*) e valor preditivo negativo (NPV – *Negative Predictive Value*)
- Pode ser usado logo após o exame vaginal
- Exame de espécuro opcional
- Resultados em 5 minutos ou menos
- Nenhum equipamento especial ou treinamento necessário
- Ampla faixa etária gestacional de 20 a 37 semanas

Aplicável logo
após o exame
vaginal*



*Fonte: Werlen et al. *Gynecol Obstet Fertil.* 2015 Oct; 43(10): 640-5.

REDUÇÃO DE CUSTOS

Diminuindo potenciais intervenções desnecessárias

85%


das pacientes que são internadas no hospital por risco de parto prematuro não entram em trabalho de parto nos próximos 7 dias*

A alta precisão do PartoSure pode, portanto, contribuir para a redução de custos:

- Reduzindo o tempo de permanência de pacientes de alto risco
- Diminuição de internações desnecessárias e intervenções agudas
- Minimizando transferências desnecessárias de pacientes

Resultados em 5 minutos apenas com 4 passos

1

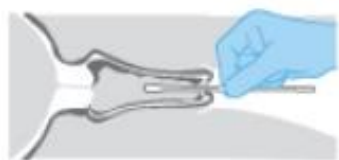

Coletando a amostra

Colete amostra de secreção vaginais com *swab* de coleta estéril por 30 segundos (sem necessidade de rotação ativa ou espéculo)

2



Transferência para solvente

Enxágue o esfregaço de amostra no frasco de solvente por 30 segundos. Elimine o cotonete.


3



A tira de teste

Insira a tira de teste no frasco. Positivo assim que as linhas de reboque estiverem visíveis na faixa. 5 minutos de espera para resultado negativo.

4

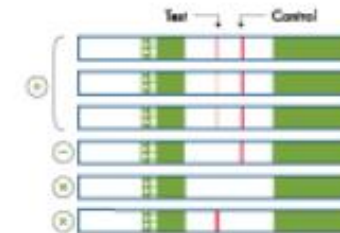

Lendo os resultados

Um resultado positivo é indicado por duas linhas na região de repouso, enquanto um resultado negativo é indicado por uma única linha de controle da região do teste. Não leia ou interprete o resultado após 10 minutos da inserção da tira no frasco.

Nota: uma lista de teste fraca ou quebrada deve sempre ser lida como positiva

*Favor consultar folheto informativo que consta na embalagem para instruções completas de uso



 **PartoSure™**

Fácil, Rápido e Confiável

Uma avaliação mais precisa para identificar quem realmente está em risco de trabalho de parto prematuro